

Traumastem TAF

STERILNÍ VSTŘEBATELNÁ HEMOSTATICKÁ SÍTKA

Popis:

Traumastem TAF je sterilní vstřebatelná hemostatická sítká na bázi oxidované celulózy ve formě plošných přřezů. Ekvivalentní chemický název pro tento ZP je kopolymer anhydroglukózy a kyseliny anhydroglukuronové připravené chemickou oxidací. Prostředek neobsahuje žádné další účinné látky. Je sterilizován ionizujícím zářením. Plošná hmotnost: 220 – 350 g/m².



Účel použití/Indikace:

Traumastem TAF se používá jako pomocný prostředek k zástavě kapilárního, venózního, malého arteriálního krvácení a také k prevenci krvácení v časném pooperačním průběhu. Je použitelný ve všech oblastech zástavy difúzního krvácení z resekcčních ploch například parenchymatózních orgánů, svalů či ohraničených tělních dutin. Široký rozsah použití umožňuje využití u výkonů prováděných klasicky, v robotické chirurgii i u endoskopických zákroků (např. laparoskopických).

Mechanismus účinku:

Na procesu hemostázy se významně podílí vysoká absorpční schopnost a velký specifický povrch oxidované přírodní celulózy (bavlny). Oxidovaná celulóza se po kontaktu s krví mění v adhezivní gel, který chrání trombocyty před vymýváním z rány, čímž rychleji zastavuje krvácení. Minimalizuje peroperační i časné postoperační krevní ztráty a komplikace, má významné antibakteriální účinky, podílí se na akceleraci biochemických procesů, podporuje proces hojení.

Kód GMDN:

38771 Hemostatický prostředek s rostlinnými polysacharidy

Klasifikace:

Klasifikace zdravotnického prostředku III podle pravidla 7, čtvrté odrážky (příloha VIII k Nařízení 2017/745). Výrobek je sterilní.

Traumastem TAF

STERILNÍ VSTŘEBATELNÁ HEMOSTATICKÁ SÍTKA

Balení:

Balení po 10 ks v papírové krabičce. Jednotlivé kusy jsou zabaleny v primárním a sekundárním obalu.

Skladování:

Skladovat v originálním balení a v suchu, při teplotě 2 – 30 °C a chránit před přímým sluncem.

Životnost:

Doba použitelnosti prostředku Traumastem TAF je 36 měsíců za podmínky skladování za výše uvedených skladovacích podmínek.

Sterilita:

Zdravotnický prostředek je dodáván sterilní. Sterilizace je prováděna gama zářením. Sterilitu zajišťuje neporušený obal. Zdravotnický prostředek nelze resterilizovat.

Informace pro objednání:

Katalogové číslo	Název výrobku	Rozměr sítky	Počet ks v balení
10230	Traumastem TAF	1,5 x 5 cm	10 ks
10231	Traumastem TAF	7,5 x 5 cm	10 ks
10232	Traumastem TAF	12,5 x 5 cm	10 ks
10233	Traumastem TAF	35 x 5 cm	10 ks
10234	Traumastem TAF	20 x 10 cm	10 ks

BIOSTER, a.s.

Tejny 621

664 71 Veverská Bítýška

Česká republika

bioster@bioster.cz

www.bioster.cz

